



**MEDintim**  
personal healthcare



# Oralsafe

Latexschutz für oral-genital Kontakt

**Oralsafe** ist ein Latexschutztuch, das den Schutz vor übertragbaren Infektionen bei oral-genitalem Kontakt verbessert.

## Anwendung:

Nehmen Sie das Latextuch vorsichtig aus der Umhüllung. Befeuchten Sie die Scheiden- oder Analregion mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis. Legen Sie **Oralsafe** über den Scheideneingang und die Klitoris, bzw. über den Analbereich. Halten Sie das Tuch während des oralen Verkehrs in seiner Lage fest. Das benutzte Tuch gehört in den Hausmüll. Bitte nicht in die Toilette werfen.

## Wichtige Hinweise:

Benutzen Sie ein neues **Oralsafe**, wenn Sie zwischen den Bereichen wechseln. Zerteilen Sie die Tücher nicht und verwenden Sie jedes nur einmal! Wenn Sie oder ihre Partner/in ein Medikament im Genitalbereich verwenden, klären Sie bitte mit Ihrem Arzt die Verträglichkeit von **Oralsafe**. Bei bestehender Latexunverträglichkeit kann **Oralsafe** eine allergische Reaktion auslösen. **Oralsafe** bietet Schutz vor Infektionen.

## Inhaltsstoffe:

Naturkautschuklatex

## Inhalt:

8 x 1 Stk. Latextuch zur einmaligen Verwendung, lieferbar mit Vanille- bzw. Erdbeeraroma  
Größe: 252 x 115 mm  
Farbe: beige  
Faltschachtel: 65 x 93 x 19 mm

## Lagerung:

Kühl und trocken lagern.  
Vor Sonnenlicht (UV) schützen

## Hersteller

Kessel Marketing & Vertriebs GmbH

Verkauf über den Fachhandel und in Apotheken.

Erdbeer EAN 4013273900164  
PZN 0222367

Vanille EAN 4013273900171  
PZN 0222396



Medizinprodukt



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH  
Kelsterbacher Straße 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20  
Fax (06105) 45 59 01  
E-Mail: service@medintim.de